

1. Indledning

Vi glæder os over, at du har købt et førsteklasses Mobilex produkt. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret produktbeskrivelse og væsentlige instrukser for korrekt brug af produktet. Derfor bedes du læse denne vejledning grundigt, før produktet tages i anvendelse. Venligst vær opmærksom på alle forholdsregler, især sikkerhedsanvisningerne, og overhold altid disse, så du opnår en sikker og langvarig anvendelse af produktet.

Formålsbeskrivelse

Rollatoren er beregnet til personer, som pga. bevægelsesproblemer har brug for støtte ved gang men som selv er i stand til at bruge rollatoren uden at komme til skade eller øve skade på andre. Takket være sædet kan brugeren til enhver tid sætte sig for at få en pause. Rollatoren må kun bruges til at komme frem med og til kortvarigt at sidde på.

Indikation

Rollatoren er et medicinsk udstyr, der er beregnet til at hjælpe personer med funktionsnedsættelse. Indikationerne for anvendelse er sygdomme, der forårsager bevægelsesbegrænsninger og handicap, som hindrer selvstændigt at sidde, stå og gå. Der er derfor behov for en ekstra stabil støtte, når de ovennævnte aktiviteter udføres. Indikationerne kan ikke relateres til et bestemt sygdomsbillede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers sundhedstilstand af en professionel læge eller fysioterapeut, men de vigtigste målgrupper er ældre mennesker, personer med parese, reumatiske sygdomme og andre personer med begrænset mobilitet i lænderyggen, knæ eller hofter. Det er forbudt at bruge produktet til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

Kontraindikation

Rollatorer er ikke beregnet til personer, der ikke kan opretholde en korrekt kropsbalance i siddende og stående stilling. Hjælpemidlet må ikke anvendes, hvis brugeren har problemer med nedsat opfattelsesevne. Kontraindikationer kan ikke relateres til et bestemt klinisk billede, og de afhænger af en individuel vurdering af den potentielle brugers sundhedstilstand. Valget af ortopædisk hjælpemiddel, der passer til et givet sygdomsbillede, skal altid foretages med hjælp fra en speciallæge eller fysioterapeut. Derudover skal du overholde sikkerhedsoplysningerne i kapitel 2.

Ved spørgsmål til produktet bedes du henvende dig til forhandleren eller direkte til Mobilex A/S

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 E-Mail: info@mobilex.dk
--	---

2. Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktionsændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- Pas på ikke at få fingrene i klemme eller få andre skader ved alle rollatorens samlinger samt i forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m.
- Check at begge bremsere fungerer inden ibrugtagning.
- Benyt kun rollatoren, når den er fuldt udklappet og med låsemekanismen helt fastlåst.
- Kontroller jævnligt dæktrykket, da det altid skal være 2.1-2.4 bar (30-35 psi).
- Kontroller og efterspænd jævnligt fingerskruerne.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag indendørs og udendørs.
- Alle hjul skal til hver en tid være i kontakt med underlaget. Dette sikrer, at rollatoren er i balance og derved undgår evt. uheld.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på, SKAL bremserne blokeres.
- Begge bremsehåndtag skal aktiveres og blokeres på én gang.
- Efterlad aldrig en rollator ulåst i bremsefunktionen.
- Produktet må aldrig udsættes for større belastning end i alt 150 kg, Kurven kan max. bære 5 kg.
- Husk jævnlig efterspænding af fingerskruerne.

3. Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Elephant Air rollatoren har en forstærket ramme af pulverlakeret aluminium og er udstyret med 4 hjul. Letvægtsaluminiumsrammen gør det let at folde rollatoren sammen samt opbevare og transportere den. Den er let at manøvrere og er tilstrækkelig stabil. Skubbehåndtagene kan indstilles i højden. Rollatoren er fra fabrikken af udstyret med et monteret sæde og en indkøbstaske og leveres også som standard med rygbælte og stokkeholder.

Leverancen omfatter

- ✓ 1 rollator sammenfoldet, inkl. sæde, stokkeholder, rygbælte og taske
- ✓ 1 brugervejledning



Kontrol

Kontroller vha. ovenstående at der ikke mangler noget. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte forhandleren af produktet.

Klargøring

- Sæt rollatoren med hjulene på gulvet. Tag fat i den sorte lås og vip den op og fri af rørene ved sædet, rollatoren foldes ud. Tryk herefter de to rør nedad, indtil der høres et klik i låsemekanismen. Nu er rollatoren foldet ud og sikret mod at falde sammen.
- Kontroller inden brug at boltene, der fastgør hjulene, er korrekt fastgjorte, og at rollatoren er stabil, således at ingen dele kan bevæges.
- Kontroller endvidere bremsens funktion, før rollatoren anvendes.



Sammenfoldning af rollator

- For at folde rollatoren sammen skal der trækkes opad i stroppen midt på sædet.
- Derefter udløses låsemekanismen, og rollatoren kan foldes sammen.

Højdeindstilling af skubbehåndtag

- For at indstille højden på skubbehåndtagene trykkes trykknappen ind.
- Derefter indstilles håndtagene i den ønskede højde, tjek at trykknappen igen er sprunget ud.

Juster højden på skubbehåndtagene, så håndtagene er i håndledshøjde, når brugeren står ved siden af rollatoren med armene strakt lodret nedad. Det betyder, at armene har en vinkel på 20°- 30°, når rollatoren anvendes.



Brug af håndbremsene

- For at bremse skal du trække begge bremsehåndtag opad for at bremse.
- Jo hårdere du trækker i bremsegrebene, jo stærkere er bremseeffekten.
- For at STOPPE skal du holde bremsegrebene aktiveret.
- Hvis du vil flytte rollatoren, skal du slippe bremserne igen. De frigives automatisk.

- Aktiver altid parkeringsbremsene, når du ikke bruger rollatoren!**
Løsn aldrig parkeringsbremsene, når du sidder på rollatoren!
Hvis du parkerer rollatoren på ujævne eller skrånende stier, skal parkeringsbremsene altid aktiveres!

Låsning / frigørelse af bremses

- For at standse rollatoren skal du trække bremsehåndtagene opad for at få den til at standse.
- For at parkere skal du trykke bremsegrebene ned, indtil du hører et "klik".
- Rollatoren må kun bruges til at sidde, når bremsene er låst.
- Før du kører af sted igen, skal du stille dig i kørselsretningen og frigøre bremsehåndtagene ved at trække dem opad.

Når du parkerer, skal du altid låse bremsene.

Brug aldrig sædet, uden at bremsene er låst!

Læn dig aldrig bagover, når du sidder. Det anbefales kun at bruge forsædet og ikke at sidde på tasken eller læne sig bagud.

Tilbehør

Der findes ikke noget tilbehør til rollatoren.

Håndtering under transport

Det anbefales at transportere rollatoren i sammenfoldet stand. Dens konstruktion gør det muligt på en let måde at folde den ud og folde den sammen. Man bør sikre sig, at rollatoren befinder sig i en stabil position under transporten, så den ikke bliver skævet.

Anvendelse


Stil dig midt bag ved baghjulene, tag fat om håndtagene og udløs bremsene. Bremsene er specialudviklet, således at kun en lille kraftanstrengelse er nødvendig.

4. Tekniske data

Rollator Elephant Air	Creme Royal 317001	Small 317002
Højde af skubbehåndtag (justérbar)	87,3 - 104,8 cm	
Anbefalede brugerhøjde	150 - 195 cm	
Sædehøjde	62 cm	
Total bredde åben / sammenfoldet	73,7 cm / 28,0 cm	
Indv. bredde mellem skubbehåndtag	45,5 - 40,7 cm	
Længde (dybde)	80,5 cm	
Vægt (+ taske 380 g)	10,68 kg	
Max. belastning (rollator / taske)	150 kg / 5 kg	
Bremses	2 låsbare med parkeringsfunktion	
Hjul	Forhjul og baghjul: 12" / 291 mm	

Typeskilt

Findes på den nederste rammedel

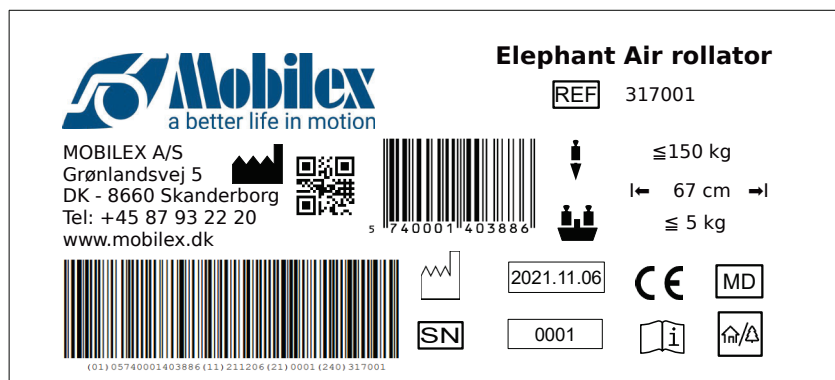

Billede af typeskilt Elephant 317001

	QR-code link til hjemmesiden		Produktionsdato
	Producent		Max belastning
	Se bruger-vejledningen		Max bredde
	Til indendørs/udendørs brug		serienr.
	CE mærket produkt		Yareur
	Max belastning kurv		Medicinsk udstyr
	Kun til indendørs brug		

Oversigt ikon betydning

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler eller alkoholholdige produkter og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men bør regelmæssigt gennemgå en kontrol, der kan foretages af en sagkyndig. Ved en sådan kontrol anbefaler vi at følgende kontrolleres og udføres:

- ✓ Rengøring og desinficering af produktet
- ✓ Ramme/produkt tjekkes for skævheder og tegn på brud
- ✓ Sliddele kontrolleres og skiftes hvis nødvendigt
- ✓ Generel efterspænding af produktet og kontrol af dæktryk

Anbefalet levetid: Normalt 10 år afhængigt af brugen.

Rensning af hjulene

Det anbefales at rengøre hjulene med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Foretag også smøring af lejer ved at spraye et smøremiddel på engang imellem eller når hjulene begynder at knirke.

Advarsel



Udsættes produktet for meget kalkholdigt vand, kan en binding og ophobning af kalk på hjullejer og andre bevægelige dele forekomme. I dette tilfælde kan produktet rengøres med et kalkopløsende middel og derefter smøres med smøreolie.

Advarsel



Vær opmærksom på at hvis rammen er bøjet eller har brud må produktet ikke genanvendes, men skal udskiftes

Opbevaring

Vi anbefaler opbevaring på et tørt sted.

Genanvendelse

Produktet er egnet til genanvendelse. Før genanvendelse, hvor en ny bruger skal overtage produktet, skal produktet være kontrolleret i henhold til pkt. 5.

6. Generel problemløsning

Problembeskrivelse	Mulig årsag	Løsningsforslag
Rollatoren er svær at styre eller skubbe	Snavs mellem hjul og gaffler	Fjern evt. snavs og hår mellem hjul og gaffel
Bremserne virker ikke eller virker kun i den ene side	Bremseklodser er slidt eller bremsen er forkert indstillet	Kontroller hvordan bremsen er indstillet, udskift evt. bremseklodser (→ serviceværksted)
Sædet går ikke rigtigt i hak ved udklapning	Låseanordningen er forkert indstillet eller defekt	Tjek at låseanordningen er rigtigt indstillet eller udskift denne (→ serviceværksted)
Rollatoren kører skævt	Der er for lidt luft i dækkene	Tjek dæktryk

7. Bortskaffelse af produktet

Produktet kan ikke bortskaffes med almindeligt affald men skal afleveres på en lokal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse af produktet, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsmæssige ændringer på produktet uden vores skriftlige accept, bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal du straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte. Garantien dækker ikke transportomkostninger og omfatter ikke erstatning for personskader eller manglende benyttelse af produktet under reparation. Der ydes ikke erstatning for skader, der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.