

Monteringsanvisningar för Duschstol med rygg- och armstöd

varunummer 254300

1



Det medföljer 5 korta och 4 långa fingerskruvar, med O-ringar till dem alla.

De 4 långa skruvar, används för att skruva fast de kryssade benen under sätet, i hörnen.

En av de korta skruvarna ska placeras i mitten under sitsen. Det är den som håller de korsade benen på plats.

2



De 4 återstående korta skruvarna ska användas för samling av ryggstödet.

3 + 4



"Underbenen" klickas in i de monterede "halva" ben på stolen.

Armstöden klickes in / ner i ben-beslagene - på siden om sätet, så de lutar utåt.